


Manual de Usuario

# CARRO GABINETE 75 IB

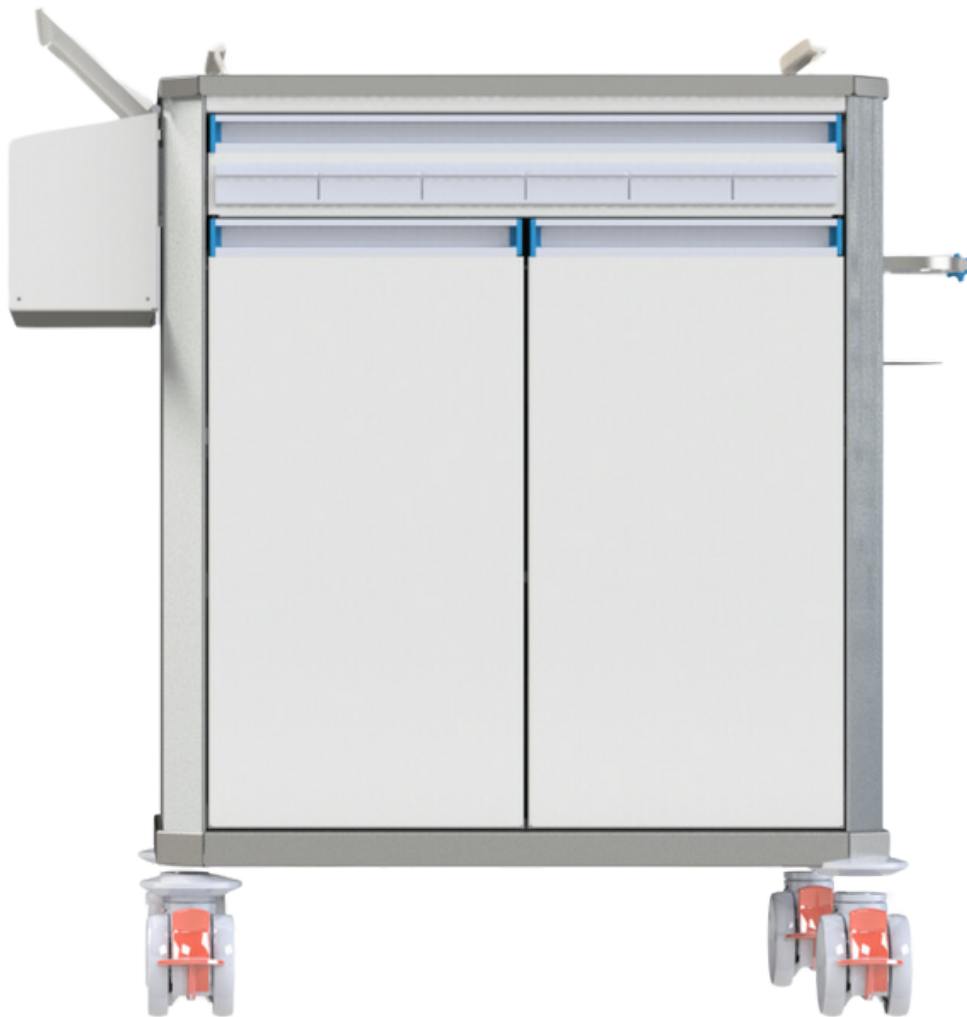

### **Prefacio**

El manual de usuario contiene información sobre las especificaciones técnicas, instrucciones de uso del carro gabinete 75 IB.

### **Destinatarios**

El manual está dirigido a los usuarios que requieran usar el carro gabinete 75 IB, que se espera tengan el uso correcto y práctico que es necesario para la vida útil del mobiliario.

### **Ilustraciones**

Las ilustraciones en el manual son solo de referencia y pueden no coincidir con las descritas en el manual.

### **Derechos de autor**

Ideas Biomédicas S.A.S

Versión: MUCG75-VI

Nombre del producto: Carro gabinete 75 IB

Modelo del producto: 75 IB

### **Declaración**

Todos los derechos reservados por Ideas Biomédicas S.A.S

Este manual de usuario contiene información del carro gabinete 75 IB, su finalidad que los usuarios puedan conocer el funcionamiento, mantenimiento y reparación de la línea de mobiliario IB.

No revele el contenido del manual.

Está prohibido reproducción, transcripción o cualquier medio, electrónico o mecánico, incluido hacer fotocopias y grabaciones, o traducir a cualquier otro idioma, sin la autorización de Ideas Biomédicas S.A.S

Este manual de instrucciones NO implica la transferencia a terceros de ningún derecho de propiedad intelectual o de patentes.

El contenido del manual está sujeto a cambios sin previo aviso.

# TABLA DE CONTENIDO

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Capítulo 1. Seguridad .....                    | 1  |
| Información de seguridad .....                 | 1  |
| Símbolos Carro gabinete 75 IB .....            | 3  |
| Símbolos de embalaje .....                     | 4  |
| Capítulo 2. Descripción General .....          | 5  |
| Presentación del producto .....                | 5  |
| Características .....                          | 6  |
| Especificaciones técnicas .....                | 7  |
| Capítulo 3. Instalación .....                  | 9  |
| Desembalaje e inspección .....                 | 9  |
| Uso inicial .....                              | 10 |
| Almacenamiento en cajones y/o bandejas .....   | 11 |
| Capítulo 4. Limpieza y Mantenimiento .....     | 12 |
| Plan de mantenimiento .....                    | 12 |
| Protocolo mantenimiento preventivo .....       | 13 |
| Procedimiento de limpieza y desinfección ..... | 14 |
| Septalkan .....                                | 15 |
| Surfalkan .....                                | 16 |
| Capítulo 5. Disposición Final .....            | 17 |
| Ficha ambiental .....                          | 17 |
| Capítulo 6. Garantía .....                     | 19 |
| Términos y condiciones .....                   | 19 |
| Capítulo 7. Contacto .....                     | 21 |
| Directorio Ideas Biomédicas .....              | 21 |

Seguridad

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



## ADVERTENCIA:

Alerta ante situaciones que podrían provocar consecuencias graves o poner en peligro la seguridad del personal. El incumplimiento de la información de advertencia puede aparejar lesiones graves o la muerte del usuario o del paciente.

### Casos:

- Este carro gabinete está diseñado para transporte material estéril y logística hospitalaria, y solo puede ser utilizado por personal capacitado.
- Antes de usar, verifique el carro gabinete y sus accesorios, para garantizar su funcionamiento normal y seguro.
- Cuando elimine el material de embalaje cumpla con las leyes y disposiciones locales y con las normas de eliminación de residuos del hospital. Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Para garantizar la seguridad, evite apilar múltiples dispositivos o colocar elementos sobre el carro gabinete, diferentes a los destinados para su uso.
- Los elementos dentro del carro gabinete son solo para uso del personal asistencial capacitado.

Seguridad

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



## PRECAUCIÓN:

Alerta ante potenciales peligros o prácticas inseguras que, de no evitarse, podrían ocasionar lesiones personales leves, fallas en el producto, daños o pérdidas en la propiedad. También podrían ocasionar lesiones más graves en el futuro.

### Casos:

- Evite daños en el carro gabinete y garantice la seguridad del usuario; utilice los accesorios especificados en este manual.
- Evite daños en el cierre lento de los cajones; no sobreponer elementos o superar la capacidad de almacenamiento.
- Maneje el carro gabinete con cuidado para evitar daños causados por caídas, golpes, oscilación violenta u otras fuerzas mecánicas externas.
- Al finalizar su vida útil, el carro gabinete y sus accesorios se deben eliminar de acuerdo con las leyes y disposiciones locales o según las normas del hospital.



## NOTA:

Destaca las precauciones importantes y proporciona instrucciones o explicaciones para la mejor utilización del producto.

### Casos:

- Coloque el carro gabinete en una posición donde se pueda realizar la observación, funcionamiento y mantenimiento de manera conveniente.
- El presente manual de instrucciones se basa en la configuración 75 IB.
- Conserve este manual a mano para una referencia fácil y oportuna.
- La vida útil del carro gabinete 75 IB es de 10 años\*.

\*Todos los productos de Ideas Biomédicas S.A.S son actualizables y modulares, por lo que si una pieza se daña esta puede ser reemplazada y el producto seguirá funcionando por un mayor periodo de tiempo.

Seguridad

# SÍMBOLOS CARRO GABINETE 75 IB



Capacidad de carga por gaveta: Sugiere el peso aproximado de 15 kg para cada cajón.



Consulte el manual: Sugiere leer el manual de usuario para uso adecuado del carro gabinete.



Desbloquear/ bloquear llantas: Indica el sentido en el que se debe presionar el freno para bloquear o desbloquear las ruedas.



No apoyarse: Indica no apoyarse sobre el carro y/o demás elementos acoplados en el mismo.



No abrir al mismo tiempo las gavetas: Indica que no deben estar abiertos los cajones en simultaneo.

Seguridad

# SÍMBOLOS DE EMBALAJE



Este lado hacia arriba: Indica la posición correcta del embalaje durante el transporte y el almacenamiento.



Sensible a la humedad: Indica que el embalaje debe mantenerse en un ambiente seco y que el contenido puede dañarse por la humedad.



Muy frágil: Indica que el contenido transportado es frágil y que debe ser manejado con cuidado.



Cuidado en la manipulación: Indica que se debe manejar o manipular con cuidado.



Reciclable: Indica que el material con el que está fabricado el embalaje puede ser reciclado. Aplicable a papel, plástico y vidrio.

## FRAGILE

## Descripción General

# PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO


Diseño modular en aluminio y acero, que permite múltiples opciones de configuración, fácil mantenimiento, futuras actualizaciones y variedad de accesorios.

- Compacto, versátil, resistente y fácil de transportar ideal en labores de apoyo clínico.
- Atributos y variantes:

| ATRIBUTO           | VARIANTE                                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bloqueo Central    | Bloqueo Central: Chapa<br>Bloqueo Central: No                                                     |
| Ruedas             | Ruedas Levina 4" (2) con freno<br>Ruedas Levina 5" (2) con freno<br>Ruedas Línea 4" (2) con freno |
| Número de Bandejas | 1 Bandeja<br>2 Bandejas<br>3 Bandejas                                                             |


Descripción General

# CARACTERÍSTICAS

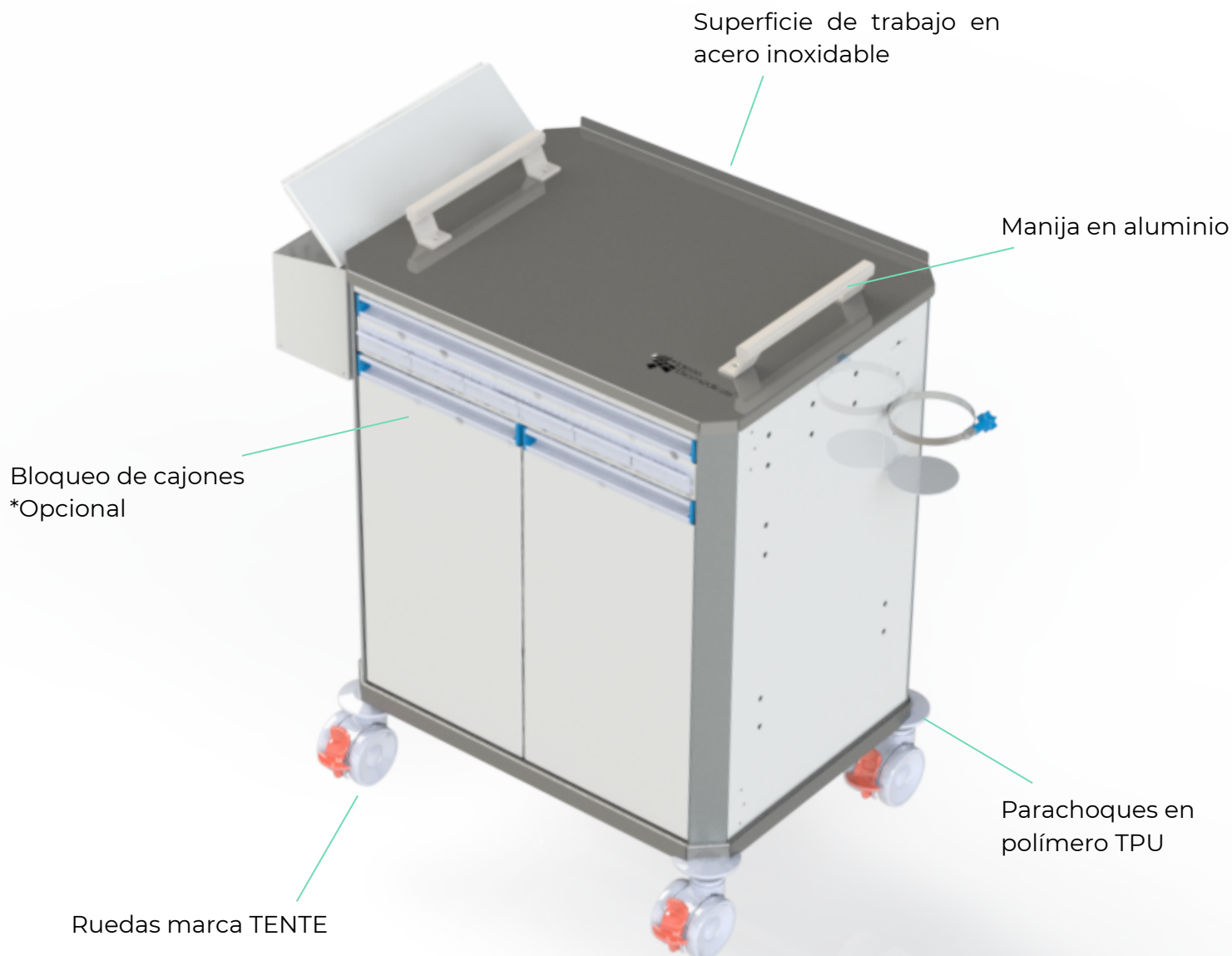

## Descripción General

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
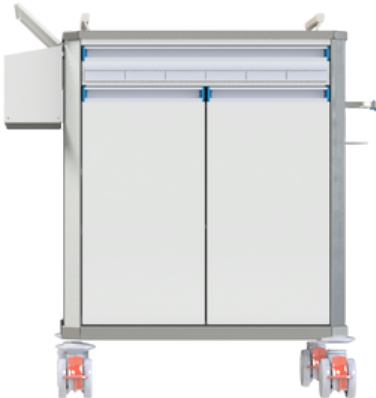
| NOMBRE Y CATEGORÍA       |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto      | Carro gabinete 75 IB                                                                |
| Marca                    | Ideas Biomédicas S.A.S                                                              |
| Modelo                   | 75 IB                                                                               |
| Palabras claves          | Logística hospitalaria, transporte de material estéril                              |
| PROPÓSITO DE USO         |                                                                                     |
| Imagen                   |  |
| Uso clínico              | Transporte de material                                                              |
| Nivel permitido de uso   | Central de esterilización                                                           |
| Generalidades            | Almacenamiento y transporte de material                                             |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |                                                                                     |
| Voltaje                  | No aplica                                                                           |
| Potencia                 | No aplica                                                                           |
| Temperatura set          | No aplica                                                                           |
| Sensor                   | No aplica                                                                           |

## Descripción General

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                               |                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Control                       | No aplica                                                                                                      |
| Seguridad                     | No aplica                                                                                                      |
| Accesorios o consumibles      | Revisar el Catálogo de Accesorios                                                                              |
| Batería                       | No aplica                                                                                                      |
| Empaque                       | Embalaje                                                                                                       |
| Peso                          | 40 kilos aproximadamente                                                                                       |
| Dimensiones externas          | 530 profundidad x 900 altura x 750 ancho (mm)                                                                  |
| Dimensiones internas          | 500 profundidad x 850 altura x 700 ancho (mm)                                                                  |
| Capacidad                     | Bandejas: Soporta 10 kilos aproximadamente<br>Cajón: Soporta 5 kilos aproximadamente                           |
| Materiales                    | Acero con pintura electrostática, acero inoxidable, TPU                                                        |
| Vida útil                     | 10 años                                                                                                        |
| GARANTÍA Y MANTENIMIENTO      |                                                                                                                |
| Garantía                      | 12 meses. Aplica garantía extendida según términos de negociación                                              |
| Mantenimiento                 | Anual.<br>Requiere cambio de algunos componentes de desgaste mecánico                                          |
| SEGURIDAD Y ESTÁNDARES        |                                                                                                                |
| Clasificación                 | No aplica                                                                                                      |
| Certificaciones               | No                                                                                                             |
| ESPECIFICACIONES AMBIENTALES  |                                                                                                                |
| Condiciones de trabajo        | Temperatura ambiente: 0° a 40° C<br>Humedad relativa: ≤ 93%                                                    |
| Condiciones de transporte     | El carro gabinete debe estar protegido de impactos y vibración violenta                                        |
| Condiciones de almacenamiento | El carro gabinete debe estar embalado y almacenado en un cuarto libre de agentes corrosivos y humedad excesiva |

## Instalación

# DESEMBALAJE E INSPECCIÓN

Retirar cuidadosamente el empaque y sus accesorios del empaque y verificar cada uno de los elementos. En caso de daños, comuníquese de inmediato con Ideas Biomédicas S.A.S o con su distribuidor.

- Verificar que todos los elementos suministrados coinciden con la factura.

**ADVERTENCIA:** Antes de usar, verifique el carro gabinete y sus accesorios, para garantizar su funcionamiento normal y seguro. Cuando elimine el material de embalaje cumpla con las leyes y disposiciones locales y con las normas de eliminación de residuos del hospital. Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

- Verificar que no haya daños.

**ADVERTENCIA:** Si necesita devolver el producto a Ideas Biomédicas S.A.S, comuníquese con el departamento de servicio post-venta de nuestra compañía o con el distribuidor. Deberá suministrar el número de serie del producto, que puede encontrar en la placa de identificación ubicada en la parte lateral inferior izquierda. Si el número es ilegible, la devolución le será denegada. Además, una breve descripción del motivo de devolución para determinar si la devolución es aplicable.



## Instalación

# USO INICIAL

- Desbloquear sistema de frenado.
- Extender los brazos.
- Mantener los brazos cerca del cuerpo, flexionados.

**PRECAUCIÓN:** Garantice la seguridad del usuario y evite el desarrollo de patologías asociadas a posturas incorrectas.

- Colocar las manos sobre las manijas, ubicarse de manera paralela al carro gabinete, con una distancia inferior a 20 cm.

**PRECAUCIÓN:** Garantice la seguridad del usuario y evite el desarrollo de patologías asociadas a posturas incorrectas.

- Extender el pie de preferencia.
- Empujar suavemente el carro gabinete.

**PRECAUCIÓN:** Maneje el carro gabinete con cuidado para evitar daños causados por caídas, golpes, oscilación violenta u otras fuerzas mecánicas externas.

- Extender el pie contrario de acuerdo con la zancada de cada usuario.
- Al tener el carro gabinete en la ubicación final, active el sistema de frenado.

**PRECAUCIÓN:** Evite daños en el carro gabinete y garantice la seguridad del usuario.

Instalación

# ALMACENAMIENTO EN CAJONES Y/O BANDEJAS

- Colocar los elementos dentro de los cajones o bandejas.

**ADVERTENCIA:** Los elementos dentro del carro gabinete son solo para uso del personal asistencial capacitado.

**PRECAUCIÓN:** Evite daños en el cierre lento del cajón; no sobreponer elementos o superar la capacidad de almacenamiento.

## Limpieza y Mantenimiento

# PLAN DE MANTENIMIENTO

Las actividades de mantenimiento deben ser realizadas por personal autorizado por Ideas Biomédicas S.A.S, en el plazo descrito para cada componente. Antes de realizar pruebas o mantenimiento el carro gabinete debe estar limpio y desinfectado.

| ELEMENTO DE PRUEBA Y/O MANTENIMIENTO | FRECUENCIA                   |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Ruedas                               | Anual o cuando sea necesario |
| Tapa inoxidable                      | Anual o cuando sea necesario |
| Placa lateral                        | Anual o cuando sea necesario |
| Cajon 75 mm                          | Anual o cuando sea necesario |
| Peral aluminio M41                   | Anual o cuando sea necesario |
| Peral aluminio M13                   | Anual o cuando sea necesario |
| Riel cierre lento                    | Anual o cuando sea necesario |
| Soporte para riel cierre lento       | Anual o cuando sea necesario |
| Base refuerzo                        | Anual o cuando sea necesario |
| Estructura cajón lateral             | Anual o cuando sea necesario |
| Bandeja carro 75                     | Anual o cuando sea necesario |
| Cajones                              | Anual o cuando sea necesario |
| Bisagras                             | Anual o cuando sea necesario |
| Tornillería                          | Anual o cuando sea necesario |
| Chapa                                | Anual o cuando sea necesario |

Limpieza y Mantenimiento

# PROTOCOLO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

|        |              |
|--------|--------------|
| Fecha: | Responsable: |
| Área:  | Serial:      |

| ACTIVIDAD                                                                                             | APRUEBA | DESAPRUEBA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Realizar inspección física del carro gabinete para determinar las condiciones en las que se encuentra |         |            |
| Verificar estado de cierre lento en cajones                                                           |         |            |
| Verificar estado de ruedas                                                                            |         |            |
| Verificar el estado de puertas                                                                        |         |            |
| Verificar estado de chapa manual o electrónica                                                        |         |            |
| Realizar limpieza general interna y externa del equipo                                                |         |            |
| Realizar ajuste o cambio de partes                                                                    |         |            |
| Lubricación de partes                                                                                 |         |            |

Observaciones:

Limpieza y Mantenimiento

# PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Todos los aceros inoxidables contienen el cromo suficiente para darle sus características de inoxidables. Muchas aleaciones inoxidables contienen además níquel para reforzar aún más su resistencia a la corrosión. Estas aleaciones son añadidas al acero en estado de fusión para hacerlo "inoxidable en toda su masa". Por este motivo no necesitan ser cubiertos, pintados o recibir otro tratamiento superficial para mejorar su resistencia a la corrosión.

El acero ordinario, cuando queda expuesto a los elementos, se oxida y se forma óxido de hierro en su superficie. Si no se combate, la oxidación continúa su proceso hasta que el acero esté completamente corroído.

Los aceros inoxidables se oxidan, pero en vez de óxido común, lo que se forma en la superficie es una tenue película de óxido de cromo muy densa que constituye una coraza contra los ataques de la corrosión. Si se elimina esta película de óxido de cromo que recubre los aceros inoxidables, se vuelve a formar inmediatamente al combinarse el cromo con el oxígeno de la atmósfera ambiente.

Cuando las secciones inoxidables entran en servicio deberán estar limpias de escamas de óxido, de aceite, de pequeñas partículas metálicas procedentes de las herramientas, troqueles e hileras, así como de todo material extraño. La corrosión por contacto puede iniciarse al cabo de mucho tiempo de estar la pieza en servicio si los métodos de limpieza empleados no son meticulosos. El óxido y suciedad en los conductos de vapor, herramientas impregnadas con acero al carbono, e inclusive aparatos de transporte sucios, pueden acarrear sustancias creadoras de corrosión por contacto. Las superficies limpias y lisas, así como la ausencia de arañazos y grietas reduce el riesgo de que se produzca corrosión por contacto.

Ideas Biomédicas S.A.S sugiere productos de limpieza como SURFALKAN o SEPTALKAN para proteger a largo plazo el material de la línea de mobiliario.

# Septalkan® | Instrucciones de Uso



- 1.** Asegúrese que la zona a limpiar y desinfectar se encuentre libre de sobre acumulación de polvo o materia orgánica.



- 2.** Aplique **Septalkan Spray** sobre un paño de microfibra o Wypall.



- 3.** Distribuya uniformemente en la zona que desea limpiar y desinfectar, respetando la técnica de limpieza y deje secar.



- 4.** No enjuague ni retire el producto. La zona estará libre de microorganismos patógenos (bacterias, virus, hongos y esporas).



- 5.** Distribuya uniformemente en la zona que desea limpiar y desinfectar, respetando la técnica de limpieza y deje secar.

## Limpieza y Mantenimiento

**Surfalkan®** | Instrucciones de Uso**1.**

Asegúrese que la superficie a limpiar y desinfectar se encuentre libre de sobreacumulación de polvo o materia orgánica.

**2.**

Aplique el producto directamente sobre toda la zona que desea limpiar y desinfectar.

**3.**

Distribuya uniformemente con un paño no tejido respetando la técnica de limpieza y deje secar.

**4.**

Deje actuar el producto sobre la superficie donde fue aplicado. Tiempo de contacto total de 5 minutos.

**5.**

No enjuague ni retire el producto. La superficie quedará libre de microorganismos patógenos.

Disposición Final

# FICHA AMBIENTAL



Ideas Biomédicas S.A.S informa con la presente que, en general, la disposición final del mobiliario es decisión del respectivo cliente.

Sin embargo, cabe anotar que todos los componentes estructurales son 100% reciclables.

Ahora, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) un residuo o desecho electrónico es todo dispositivo alimentado por la energía eléctrica cuya vida útil haya culminado. Por lo tanto, los componentes electrónicos internos presentes en el equipo (switches, fusibles, portafusibles, controlador MaxThermo, piloto de alarma y toma), necesitan de una vía de disposición diferente a la de los estructurales. Una medida importante puede ser contactar con una empresa de reciclaje y/o tratamiento de este tipo de desechos.

Todas las líneas de mobiliario promueven la economía circular permitiendo la reducción de costos asociados a nuevas compras, protegiendo el medio ambiente e impulsando el consumo sostenible.

Disposición Final

# FICHA AMBIENTAL

| ELEMENTO DE PRUEBA Y/O MANTENIMIENTO | FRECUENCIA                   |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Ruedas                               | Anual o cuando sea necesario |
| Tapa inoxidable                      | Anual o cuando sea necesario |
| Placa lateral                        | Anual o cuando sea necesario |
| Cajon 75 mm                          | Anual o cuando sea necesario |
| Peral aluminio M41                   | Anual o cuando sea necesario |
| Peral aluminio M13                   | Anual o cuando sea necesario |
| Riel cierre lento                    | Anual o cuando sea necesario |
| Soporte para riel cierre lento       | Anual o cuando sea necesario |
| Base refuerzo                        | Anual o cuando sea necesario |
| Estructura cajón lateral             | Anual o cuando sea necesario |
| Bandeja carro 75                     | Anual o cuando sea necesario |
| Cajones                              | Anual o cuando sea necesario |
| Bisagras                             | Anual o cuando sea necesario |
| Tornillería                          | Anual o cuando sea necesario |
| Chapa                                | Anual o cuando sea necesario |

Garantía

# TÉRMINOS Y CONDICIONES

Garantía:

- Para mobiliario: Garantía de doce (12) meses por defectos de fabricación.
- Para los accesorios: Garantía de tres (3) meses, a menos que el producto tenga una garantía diferente y sea pactada por escrito. Los consumibles entregados con no tienen garantía.

Tiempo de respuesta de la garantía:

- Una vez Ideas Biomédicas S.A.S confirma recepción del equipo, este será revisado y se verificará que su uso haya sido adecuado.
- El tiempo para tramitar y dar respuesta a las garantías es de 5 días hábiles, a partir de que Ideas Biomédicas S.A.S firma la recepción del equipo.

Costos de garantía:

- Si en la revisión del equipo se identifica que efectivamente es una garantía, no hay costos adicionales en el momento de reponer el equipo por uno nuevo.
- Si en la revisión del equipo se identifica que NO es una garantía y el cliente decide hacer la reparación con Ideas Biomédicas S.A.S, NO hay costos adicionales por revisión de garantía.
- Si en la revisión de equipo, se identifica que NO es garantía y el cliente decide NO realizar la reparación con Ideas Biomédicas S.A.S, el cliente deberá asumir un cobro por concepto de la revisión del equipo, el cual se indicará en el momento en que se le notifique al cliente la NO garantía, debido a que este valor varía de acuerdo con el equipo médico.
- Cuando el departamento de servicio técnico defina que NO es una garantía, se notificará al cliente por correo electrónico y se enviará el costo de la reparación, si después de 5 días hábiles de haber notificado el costo de la reparación, el cliente no da una respuesta ni reclama el equipo en las instalaciones de Ideas Biomédicas S.A.S, de acuerdo al artículo 18 de la ley 1480 de 2011 de la República de Colombia, pasado un mes de la fecha prevista para la reclamación del equipo o a la fecha en que el cliente debe aceptar o rechazar expresamente la reparación, Ideas Biomédicas S.A.S notificará al cliente por correo certificado para que lo retire dentro de los dos meses siguientes a la remisión de la comunicación. Si el cliente no lo retira se entenderá por ley que abandona el bien, e Ideas Biomédicas S.A.S deberá disponer del mismo conforme con la reglamentación que expida el gobierno nacional.

Garantía

# TÉRMINOS Y CONDICIONES

- De acuerdo con esto, posterior a los dos meses siguientes de notificar por escrito cliente sobre el retiro del equipo de las instalaciones de Ideas Biomédicas S.A.S, el cliente “deberá asumir los costos asociados al abandono del bien tales como costos de almacenamiento, bodegaje y mantenimiento” costos que serán indicados al cliente en el momento de enviar la cotización de la reparación del equipo, este costo varía dependiendo del equipo.

No hay garantía cuando las fallas son causadas por mal uso del mobiliario médico, de los equipos o por redes eléctricas inadecuadas. En todo caso la garantía que aplica se especifica en la factura y será correspondiente a las características que permita cada producto.

Exoneración de responsabilidad de la garantía:

- El uso indebido del bien por parte del consumidor, la no atención de las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicadas en el manual del producto y en la garantía.
- Si se cambia una o varias piezas o partes del bien, éstas tendrán garantía propia.

Por avería del transportador:

- En el caso que los productos sean averiados por causa de la transportadora, el cliente deberá dejar evidencia en la guía y en la orden de entrega de Ideas Biomédicas S.A.S. y debe informar a la transportadora sobre esta inconformidad en el momento de recibo de la mercancía. En este caso, el cliente tendrá máximo tres (3) días calendario a partir de la fecha de recepción y debe presentar pruebas físicas (fotos).

Devolución:

- Si necesita devolver el producto a Ideas Biomédicas S.A.S, comuníquese con el departamento de servicio postventa. Deberá suministrar el número de serie del producto, que puede encontrar en la placa de identificación de este. Si el número es ilegible, la devolución le será denegada. Además, deberá presentar la fecha de producción y una breve descripción del motivo de devolución para evaluar la pertinencia de la situación.

Contacto

# DIRECTORIO IDEAS BIOMÉDICAS

| ÁREA                | CORREO                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Calidad             | <a href="mailto:calidad@ideasbiomedicas.com">calidad@ideasbiomedicas.com</a> |
| Información         | <a href="mailto:info@ideasbiomedicas.com">info@ideasbiomedicas.com</a>       |
| Servicio post-venta | <a href="mailto:soporte@ideasbiomedicas.com">soporte@ideasbiomedicas.com</a> |

