

Manual de Usuario

MESA PUENTE IB



Prefacio

El manual de usuario contiene información sobre las especificaciones técnicas, instrucciones de uso de la mesa puente IB.

Destinatarios

El manual está dirigido a los usuarios que requieran usar la mesa puente IB, que se espera tengan el uso correcto y práctico que es necesario para la vida útil del mobiliario.

Ilustraciones

Las ilustraciones en el manual son solo de referencia y pueden no coincidir con las descritas en el manual.

Derechos de autor

Ideas Biomédicas S.A.S

Versión: MUMP-V1

Nombre del producto: Mesa puente IB

Modelo del producto: N.A

Declaración

Todos los derechos reservados por Ideas Biomédicas S.A.S

Este manual de usuario contiene información de la mesa puente IB, su finalidad que los usuarios puedan conocer el funcionamiento, mantenimiento y reparación de la línea de mobiliario IB.

No revele el contenido del manual.

Está prohibido reproducción, transcripción o cualquier medio, electrónico o mecánico, incluido hacer fotocopias y grabaciones, o traducir a cualquier otro idioma, sin la autorización de Ideas Biomédicas S.A.S

Este manual de instrucciones NO implica la transferencia a terceros de ningún derecho de propiedad intelectual o de patentes.

El contenido del manual está sujeto a cambios sin previo aviso.

Manual de Usuario

TABLA DE CONTENIDO

Capítulo 1. Seguridad	1
Información de seguridad	1
Símbolos Mesa puente IB	3
Símbolos de embalaje	4
Capítulo 2. Descripción General	5
Presentación del producto	5
Características	6
Especificaciones técnicas	7
Capítulo 3. Instalación	9
Desembalaje e inspección	9
Uso inicial	10
Capítulo 4. Limpieza y Mantenimiento	11
Plan de mantenimiento	11
Protocolo Mantenimiento Preventivo	13
Procedimiento de Limpieza y desinfección	14
Septalkan	15
Surfalkan	16
Capítulo 5. Disposición Final	17
Ficha ambiental	17
Capítulo 6. Garantía	19
Términos y condiciones	19
Capítulo 7. Contacto	21
Directorio Ideas Biomédicas	21

Seguridad

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA:

Alerta ante situaciones que podrían provocar consecuencias graves o poner en peligro la seguridad del personal. El incumplimiento de la información de advertencia puede aparejar lesiones graves o la muerte del usuario o del paciente.

Casos:

- Esta mesa puente está diseñada para transporte y logística hospitalaria de alimentos.
- Antes de usar, verifique la mesa puente y sus accesorios, para garantizar su funcionamiento normal y seguro.
- Cuando elimine el material de embalaje cumpla con las leyes y disposiciones locales y con las normas de eliminación de residuos del hospital. Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Para garantizar la seguridad, evite apilar múltiples dispositivos o colocar elementos sobre la mesa puente, diferentes a los destinados para su uso.
- Para evitar quemaduras en el paciente (causadas por una fuga eléctrica), evitar que la mesa puente tenga contacto a un equipo electro quirúrgico de alta frecuencia.

Seguridad

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



PRECAUCIÓN:

Alerta ante potenciales peligros o prácticas inseguras que, de no evitarse, podrían ocasionar lesiones personales leves, fallas en el producto, daños o pérdidas en la propiedad. También podrían ocasionar lesiones más graves en el futuro.

Casos:

- Use la mesa puente con cuidado para evitar daños causados por caídas, golpes, oscilación violenta u otras fuerzas mecánicas externas.
- Al finalizar su vida útil, la mesa puente y sus accesorios se deben eliminar de acuerdo con las leyes y disposiciones locales o según las normas del hospital.



NOTA:

Destaca las precauciones importantes y proporciona instrucciones o explicaciones para la mejor utilización del producto.

Casos:

- Coloque la mesa puente en una posición donde se pueda realizar la observación, funcionamiento y mantenimiento de manera conveniente.
- El presente manual de instrucciones se basa en la configuración mesa puente IB.
- Conserve este manual a mano para una referencia fácil y oportuna.
- La vida útil de la mesa puente IB es de 10 años*.

*Todos los productos de Ideas Biomédicas S.A.S son actualizables y modulares, por lo que si una pieza se daña esta puede ser reemplazada y el producto seguirá funcionando por un mayor periodo de tiempo.

Seguridad

SÍMBOLOS MESA PUENTE IB



Capacidad de carga: Sugiere el peso aproximado de 10 kg.



Consulte el manual: Sugiere leer el manual de usuario para uso adecuado de la mesa puente.




Desbloquear/ bloquear llantas: Indica el sentido en el que se debe presionar el freno para bloquear o desbloquear las ruedas.



No apoyarse: Indica no apoyarse sobre la superficie de la mesa puente.

Seguridad

SÍMBOLOS DE EMBALAJE

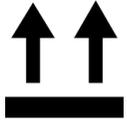

Este lado hacia arriba: Indica la posición correcta del embalaje durante el transporte y el almacenamiento.



Sensible a la humedad: Indica que el embalaje debe mantenerse en un ambiente seco y que el contenido puede dañarse por la humedad.



Muy frágil: Indica que el contenido transportado es frágil y que debe ser manejado con cuidado.



Cuidado en la manipulación: Indica que se debe manejar o manipular con cuidado.



Reciclable: Indica que el material con el que está fabricado el embalaje puede ser reciclado. Aplicable a papel, plástico y vidrio.

FRAGILE

Descripción General

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Mobiliario médico que permite y facilita la alimentación de las personas que se encuentran en reposo prolongado en cama, evitando traslados que puedan perjudicar la salud del paciente, provee la comodidad de llevar hasta el paciente sus alimentos.

- Compacto, versátil, resistente y fácil de transportar ideal en labores de apoyo clínico.
- Atributos y variantes:

ATRIBUTO	VARIANTE
Ruedas	Ruedas Línea 3" (2) con freno Ruedas Línea 2" (2) con freno Rodachinas Lumina (2) con freno
Altura variable	Altura Variable: Si Altura Variable: No

- Madera aglomerada RH:

Los paneles decorativos son antibacteriales en un 99% conforme la norma JIS Z 2801, bajo condiciones normales de humedad y ventilación no desarrollará hongos que puedan comprometer las propiedades del producto, y los ingredientes usados para su fabricación constituyen un impedimento efectivo al ataque de la mayoría de insectos.

Certificaciones:




- Acero con pintura electrostática:

Es más resistente que la pintura convencional, permite un ahorro de hasta un 97% al momento de aplicarse, lo cual la hace reciclable y presenta gran resistencia a cambios ambientales, así como a temperaturas extremas y rayos UV.

Descripción General

CARACTERÍSTICAS

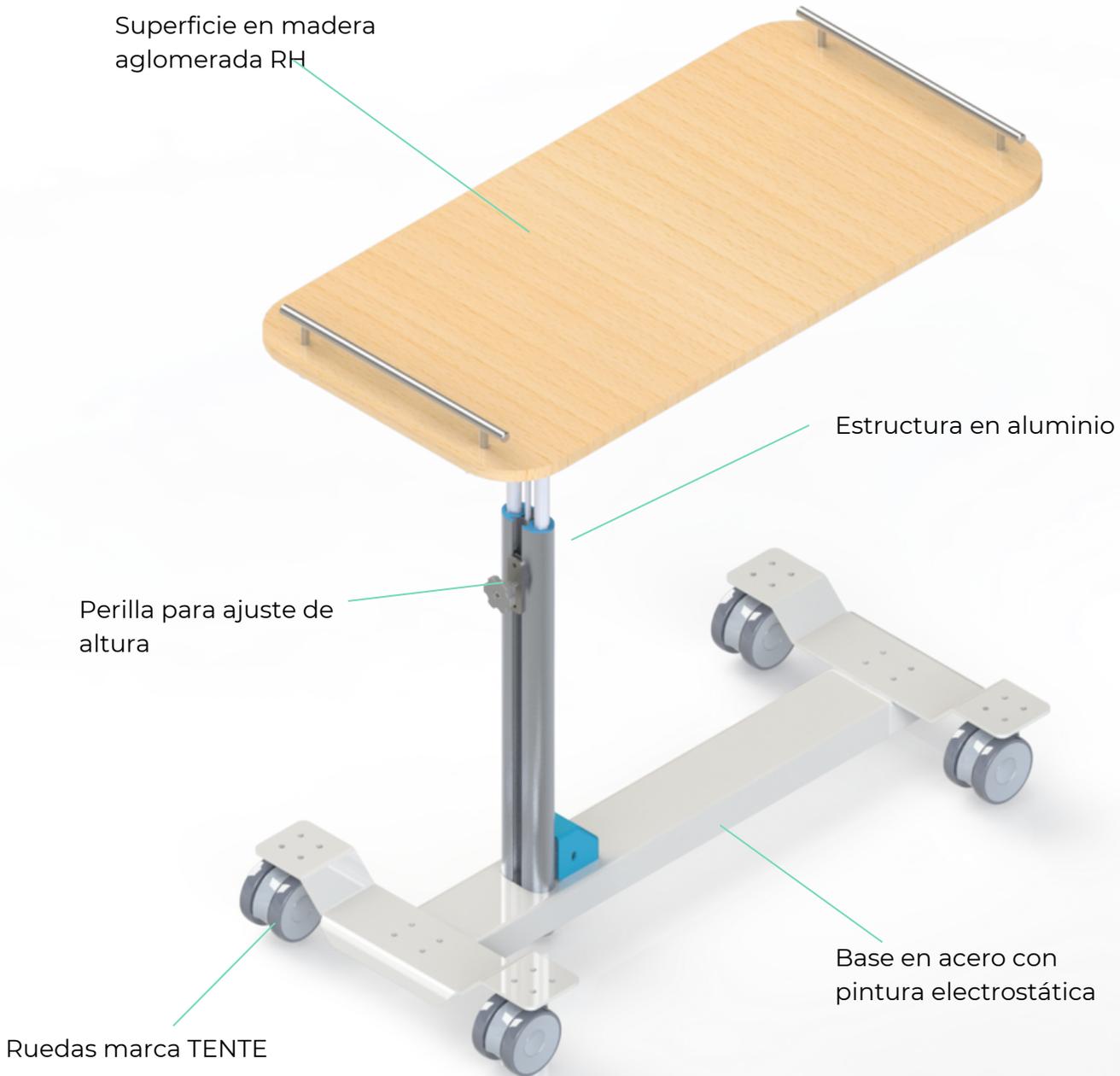

Descripción General

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NOMBRE Y CATEGORÍA	
Nombre del producto	Mesa puente IB
Marca	Ideas Biomédicas S.A.S
Modelo	No aplica
Palabras claves	Logística hospitalaria, mesa de alimentos
PROPÓSITO DE USO	
Imagen	
Uso clínico	Transporte de alimentos, mesa de alimentos
Nivel permitido de uso	Transporte de alimentos, mesa de alimentos
Generalidades	Transporte de alimentos, mesa de alimentos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Voltaje	No aplica
Potencia	No aplica
Temperatura set	No aplica
Sensor	No aplica

Descripción General

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Control	No aplica
Seguridad	No aplica
Accesorios o consumibles	No aplica
Batería	No aplica
Empaque	Embalaje
Peso	15 kilos aproximadamente
Dimensiones externas	563 profundidad x 923 altura x 1028 ancho (mm)
Dimensiones internas	No aplica
Capacidad	10 kilos aproximadamente
Materiales	Acero con pintura electrostática, aluminio, madera aglomerada, ABS, PLA
Vida útil	10 años
GARANTÍA Y MATENIMIENTO	
Garantía	12 meses. Aplica garantía extendida según términos de negociación
Mantenimiento	Anual. Requiere cambio de algunos componentes de desgaste mecánico
SEGURIDAD Y ESTANDARES	
Clasificación	No aplica
Certificaciones	Madera aglomerada RH: JIS Z 2801
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES	
Condiciones de trabajo	Tempertura ambiente: 0° a 40° C Humedad relativa: ≤ 93%
Condiciones de transporte	La mesa puente debe estar protegido de impactos y vibración violenta
Condiciones de almacenamiento	La mesa puente debe estar embalado y almacenado en un cuarto libre de agentes corrosivos y humedad excesiva

Instalación

DESEMBALAJE E INSPECCIÓN

Retirar cuidadosamente el empaque y sus accesorios del empaque y verificar cada uno de los elementos. En caso de daños, comuníquese de inmediato con Ideas Biomédicas S.A.S o con su distribuidor.

- Verificar que todos los elementos suministrados coinciden con la factura.

ADVERTENCIA: Antes de usar, verifique la mesa puente y sus accesorios, para garantizar su funcionamiento normal y seguro. Cuando elimine el material de embalaje cumpla con las leyes y disposiciones locales y con las normas de eliminación de residuos del hospital. Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

- Verificar que no haya daños.

ADVERTENCIA: Si necesita devolver el producto a Ideas Biomédicas S.A.S, comuníquese con el departamento de servicio post-venta de nuestra compañía o con el distribuidor. Deberá suministrar el número de serie del producto, que puede encontrar en la placa de identificación ubicada en la parte lateral inferior izquierda. Si el número es ilegible, la devolución le será denegada. Además, una breve descripción del motivo de devolución para determinar si la devolución es aplicable.



Instalación

USO INICIAL

- Desbloquear sistema de frenado.
- Colocar las manos sobre las manijas, ubicarse de manera paralela a la mesa de puente.

PRECAUCIÓN: Garantice la seguridad del usuario y evite el desarrollo de patologías asociadas a posturas incorrectas.

- Extender el pie de preferencia.
- Empujar suavemente la mesa puente.

PRECAUCIÓN: Use la mesa con cuidado para evitar daños causados por caídas, golpes, oscilación violenta u otras fuerzas mecánicas externas.

- Extender el pie de preferencia.
- Al tener el carro en la ubicación final, active el sistema de frenado

PRECAUCIÓN: Evite daños en la mesa puente y garantice la seguridad del usuario.

Limpieza y Mantenimiento

PLAN DE MANTENIMIENTO

Las actividades de mantenimiento deben ser realizadas por personal autorizado por Ideas Biomédicas S.A.S, en el plazo descrito para cada componente. Antes de realizar pruebas o mantenimiento la mesa puente debe estar limpia y desinfectada.

ELEMENTO DE PRUEBA Y/O MANTENIMIENTO	FRECUENCIA
Base central mesa puente	Anual o cuando sea necesario
Base horizontal mesa puente	Anual o cuando sea necesario
Ruedas	Anual o cuando sea necesario
Tornillo BUTTON INOX M6 X 16	Anual o cuando sea necesario
Tuerca SEG M6	Anual o cuando sea necesario
Pie amigo para base central	Anual o cuando sea necesario
Platina metálica posicionadora 1-0	Anual o cuando sea necesario
Tornillo BCR 6X12 INOX BUTTON	Anual o cuando sea necesario
Tuerca M6 INOX	Anual o cuando sea necesario
Perfil aluminio estructural ovalado	Anual o cuando sea necesario

Limpieza y Mantenimiento

PLAN DE MANTENIMIENTO

ELEMENTO DE PRUEBA Y/O MANTENIMIENTO	FRECUENCIA
Tornillo BCC MM INOX 6X35	Anual o cuando sea necesario
Tubo RD 5/8 INOX	Anual o cuando sea necesario
Eje inoxidable 6MM	Anual o cuando sea necesario
Platina metálica posicionadora 3-0	Anual o cuando sea necesario
Soporte mesa larga	Anual o cuando sea necesario
Soporte mesa corta	Anual o cuando sea necesario
Superficie madera aglomerada	Anual o cuando sea necesario
Manija acero inoxidable	Anual o cuando sea necesario
Perilla plástica	Anual o cuando sea necesario
Tapa pie amigo	Anual o cuando sea necesario

Limpieza y Mantenimiento

PROTOCOLO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Fecha:	Responsable:
Área:	Serial:

ACTIVIDAD	APRUEBA	DESAPRUEBA
Realizar inspección física de la mesa puente para determinar las condiciones en las que se encuentra		
Verificar estado de la superficie en madera aglomerada		
Verificar estado de perilla y altura variable.		
Verificar el estado de la base		
Verificar estado de ruedas		
Realizar limpieza general interna y externa del equipo		
Realizar ajuste o cambio de partes		
Lubricación de partes		
Realizar ajuste o cambio de partes		
Lubricación de partes		

Observaciones:

Limpieza y Mantenimiento

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Todos los aceros inoxidables contienen el cromo suficiente para darle sus características de inoxidables. Muchas aleaciones inoxidables contienen además níquel para reforzar aún más su resistencia a la corrosión. Estas aleaciones son añadidas al acero en estado de fusión para hacerlo "inoxidable en toda su masa". Por este motivo no necesitan ser cubiertos, pintados o recibir otro tratamiento superficial para mejorar su resistencia a la corrosión.

El acero ordinario, cuando queda expuesto a los elementos, se oxida y se forma óxido de hierro en su superficie. Si no se combate, la oxidación continúa su proceso hasta que el acero esté completamente corroído.

Los aceros inoxidables se oxidan, pero en vez de óxido común, lo que se forma en la superficie es una tenue película de óxido de cromo muy densa que constituye una coraza contra los ataques de la corrosión. Si se elimina esta película de óxido de cromo que recubre los aceros inoxidables, se vuelve a formar inmediatamente al combinarse el cromo con el oxígeno de la atmósfera ambiente.

Cuando las secciones inoxidables entran en servicio deberán estar limpias de escamas de óxido, de aceite, de pequeñas partículas metálicas procedentes de las herramientas, troqueles e hileras, así como de todo material extraño. La corrosión por contacto puede iniciarse al cabo de mucho tiempo de estar la pieza en servicio si los métodos de limpieza empleados no son meticulosos. El óxido y suciedad en los conductos de vapor, herramientas impregnadas con acero al carbono, e inclusive aparatos de transporte sucios, pueden acarrear sustancias creadoras de corrosión por contacto. Las superficies limpias y lisas, así como la ausencia de arañazos y grietas reduce el riesgo de que se produzca corrosión por contacto.

Ideas Biomédicas S.A.S sugiere productos de limpieza como SURFALKAN o SEPTALKAN para proteger a largo plazo el material de la línea de mobiliario.

Limpieza y Mantenimiento

Septalkan® | Instrucciones de Uso



1.

Asegúrese que la zona a limpiar y desinfectar se encuentre libre de sobre acumulación de polvo o materia orgánica.



2.

Aplique **Septalkan Spray** sobre un paño de microfibra o Wypall.



3.

Distribuya uniformemente en la zona que desea limpiar y desinfectar, respetando la técnica de limpieza y deje secar.



4.

No enjuague ni retire el producto. La zona estará libre de microorganismos patógenos (bacterias, virus, hongos y esporas).



5.

Distribuya uniformemente en la zona que desea limpiar y desinfectar, respetando la técnica de limpieza y deje secar.

Limpieza y Mantenimiento

Surfalkan® | Instrucciones de Uso



- 1.** Asegúrese que la superficie a limpiar y desinfectar se encuentre libre de sobreacumulación de polvo o materia orgánica.



- 2.** Aplique el producto directamente sobre toda la zona que desea limpiar y desinfectar.



- 3.** Distribuya uniformemente con un paño no tejido respetando la técnica de limpieza y deje secar.



- 4.** Deje actuar el producto sobre la superficie donde fue aplicado. Tiempo de contacto total de 5 minutos.



- 5.** No enjuague ni retire el producto. La superficie quedará libre de microorganismos patógenos.

Disposición Final

FICHA AMBIENTAL



Ideas Biomédicas S.A.S informa con la presente que, en general, la disposición final del mobiliario es decisión del respectivo cliente.

Sin embargo, cabe anotar que todos los componentes estructurales son 100% reciclables.

Ahora, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) un residuo o desecho electrónico es todo dispositivo alimentado por la energía eléctrica cuya vida útil haya culminado. Por lo tanto, los componentes electrónicos internos presentes en el equipo (switches, fusibles, portafusibles, controlador MaxThermo, piloto de alarma y toma), necesitan de una vía de disposición diferente a la de los estructurales. Una medida importante puede ser contactar con una empresa de reciclaje y/o tratamiento de este tipo de desechos.

Todas las líneas de mobiliario promueven la economía circular permitiendo la reducción de costos asociados a nuevas compras, protegiendo el medio ambiente e impulsando el consumo sostenible.

ELEMENTO	RECICLABLE
Base central mesa puente	Si
Base horizontal mesa puente	Si
Ruedas	Si
Tornillo BUTTON INOX M6 X 16	Si
Tuerca SEG M6	Si
Pie amigo para base central	Si

Disposición Final

FICHA AMBIENTAL

ELEMENTO	RECICLABLE
Tuerca M6 INOX	Si
Perfil aluminio estructural ovalado	Si
Tornillo BCC MM INOX 6X35	Si
Tubo RD 5/8 INOX	Si
Eje inoxidable 6MM	Si
Platina metálica posicionadora 3-0	Si
Soporte mesa larga	Si
Soporte mesa corta	Si
Superficie madera aglomerada	Si
Manija acero inoxidable	Si
Perilla plástica	Si
Tapa pie amigo	Si
Platina metálica posicionadora 1-0	Si
Tornillo BCR 6X12 INOX BUTTON	Si

Garantía

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Garantía:

- Para mobiliario: Garantía de doce (12) meses por defectos de fabricación.
- Para los accesorios: Garantía de tres (3) meses, a menos que el producto tenga una garantía diferente y sea pactada por escrito. Los consumibles entregados con no tienen garantía.

Tiempo de respuesta de la garantía:

- Una vez Ideas Biomédicas S.A.S confirma recepción del equipo, este será revisado y se verificará que su uso haya sido adecuado.
- El tiempo para tramitar y dar respuesta a las garantías es de 5 días hábiles, a partir de que Ideas Biomédicas S.A.S firma la recepción del equipo.

Costos de garantía:

- Si en la revisión del equipo se identifica que efectivamente es una garantía, no hay costos adicionales en el momento de reponer el equipo por uno nuevo.
- Si en la revisión del equipo se identifica que NO es una garantía y el cliente decide hacer la reparación con Ideas Biomédicas S.A.S, NO hay costos adicionales por revisión de garantía.
- Si en la revisión de equipo, se identifica que NO es garantía y el cliente decide NO realizar la reparación con Ideas Biomédicas S.A.S, el cliente deberá asumir un cobro por concepto de la revisión del equipo, el cual se indicará en el momento en que se le notifique al cliente la NO garantía, debido a que este valor varía de acuerdo con el equipo médico.
- Cuando el departamento de servicio técnico defina que NO es una garantía, se notificará al cliente por correo electrónico y se enviará el costo de la reparación, si después de 5 días hábiles de haber notificado el costo de la reparación, el cliente no da una respuesta ni reclama el equipo en las instalaciones de Ideas Biomédicas S.A.S, de acuerdo al artículo 18 de la ley 1480 de 2011 de la República de Colombia, pasado un mes de la fecha prevista para la reclamación del equipo o a la fecha en que el cliente debe aceptar o rechazar expresamente la reparación, Ideas Biomédicas S.A.S notificará al cliente por correo certificado para que lo retire dentro de los dos meses siguientes a la remisión de la comunicación. Si el cliente no lo retira se entenderá por ley que abandona el bien, e Ideas Biomédicas S.A.S deberá disponer del mismo conforme con la reglamentación que expida el gobierno nacional.

Garantía

TÉRMINOS Y CONDICIONES

- De acuerdo con esto, posterior a los dos meses siguientes de notificar por escrito cliente sobre el retiro del equipo de las instalaciones de Ideas Biomédicas S.A.S, el cliente “deberá asumir los costos asociados al abandono del bien tales como costos de almacenamiento, bodegaje y mantenimiento” costos que serán indicados al cliente en el momento de enviar la cotización de la reparación del equipo, este costo varía dependiendo del equipo.

No hay garantía cuando las fallas son causadas por mal uso del mobiliario médico, de los equipos o por redes eléctricas inadecuadas. En todo caso la garantía que aplica se especifica en la factura y será correspondiente a las características que permita cada producto.

Exoneración de responsabilidad de la garantía:

- El uso indebido del bien por parte del consumidor, la no atención de las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicadas en el manual del producto y en la garantía.
- Si se cambia una o varias piezas o partes del bien, éstas tendrán garantía propia.

Por avería del transportador:

- En el caso que los productos sean averiados por causa de la transportadora, el cliente deberá dejar evidencia en la guía y en la orden de entrega de Ideas Biomédicas S.A.S y debe informar a la transportadora sobre esta inconformidad en el momento de recibo de la mercancía. En este caso, el cliente tendrá máximo tres (3) días calendario a partir de la fecha de recepción y debe presentar pruebas físicas (fotos).

Devolución:

- Si necesita devolver el producto a Ideas Biomédicas S.A.S, comuníquese con el departamento de servicio postventa. Deberá suministrar el número de serie del producto, que puede encontrar en la placa de identificación de este. Si el número es ilegible, la devolución le será denegada. Además, deberá presentar la fecha de producción y una breve descripción del motivo de devolución para evaluar la pertinencia de la situación.

Contacto

DIRECTORIO IDEAS BIOMÉDICAS

ÁREA	CORREO
Calidad	calidad@ideasbiomedicas.com
Información	info@ideasbiomedicas.com
Servicio post-venta	soporte@ideasbiomedicas.com

