

Manual de Usuario

# MESA DE MAYO IB



### **Prefacio**

El manual de usuario contiene información sobre las especificaciones técnicas, instrucciones de uso de la mesa de mayo.

### **Destinatarios**

El manual está dirigido a los usuarios que requieran usar la mesa de mayo, que se espera tengan el uso correcto y práctico que es necesario para la vida útil del mobiliario.

### **Ilustraciones**

Las ilustraciones en el manual son solo de referencia y pueden no coincidir con las descritas en el manual.

### **Derechos de autor**

Ideas Biomédicas S.A.S

Versión: MUMM-VI

Nombre del producto: Mesa de mayo IB

Modelo del producto: N.A

### **Declaración**

Todos los derechos reservados por Ideas Biomédicas S.A.S

Este manual de usuario contiene información de la mesa de mayo, su finalidad que los usuarios puedan conocer el funcionamiento, mantenimiento y reparación de la línea de mobiliario IB.

No revele el contenido del manual.

Está prohibido reproducción, transcripción o cualquier medio, electrónico o mecánico, incluido hacer fotocopias y grabaciones, o traducir a cualquier otro idioma, sin la autorización de Ideas Biomédicas S.A.S

Este manual de instrucciones NO implica la transferencia a terceros de ningún derecho de propiedad intelectual o de patentes.

El contenido del manual está sujeto a cambios sin previo aviso.

Manual de Usuario

# TABLA DE CONTENIDO

Capítulo 1. Seguridad .....	1
Información de seguridad .....	1
Símbolos Mesa de Mayo .....	3
Símbolos de embalaje .....	4
Capítulo 2. Descripción General .....	5
Presentación del producto .....	5
Características .....	6
Especificaciones técnicas .....	7
Capítulo 3. Instalación .....	9
Desembalaje e inspección .....	9
Uso inicial .....	10
Capítulo 4. Limpieza y Mantenimiento .....	11
Plan de mantenimiento .....	11
Protocolo mantenimiento preventivo .....	12
Procedimiento de limpieza y desinfección .....	13
Septalkan .....	14
Surfalkan .....	15
Capítulo 5. Disposición Final .....	16
Ficha ambiental .....	16
Capítulo 6. Garantía .....	18
Términos y condiciones .....	18
Capítulo 7. Contacto .....	20
Directorio Ideas Biomédicas .....	20

Seguridad

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



## ADVERTENCIA:

Alerta ante situaciones que podrían provocar consecuencias graves o poner en peligro la seguridad del personal. El incumplimiento de la información de advertencia puede aparejar lesiones graves o la muerte del usuario o del paciente.

### Casos:

- Esta mesa está diseñada para el transporte y la preparación del material quirúrgico
- Antes de usar, verifique la mesa y sus accesorios, para garantizar su funcionamiento normal y seguro.
- Cuando elimine el material de embalaje cumpla con las leyes y disposiciones locales y con las normas de eliminación de residuos del hospital. Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Para garantizar la seguridad, evite apilar múltiples dispositivos o colocar elementos sobre la mesa, diferentes a los destinados para su uso.

Seguridad

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



## PRECAUCIÓN:

Alerta ante potenciales peligros o prácticas inseguras que, de no evitarse, podrían ocasionar lesiones personales leves, fallas en el producto, daños o pérdidas en la propiedad. También podrían ocasionar lesiones más graves en el futuro.

### Casos:

- Maneje la mesa con cuidado para evitar daños causados por caídas, golpes, oscilación violenta u otras fuerzas mecánicas externas.
- Al finalizar su vida útil, la mesa y sus accesorios se deben eliminar de acuerdo con las leyes y disposiciones locales o según las normas del hospital.



## NOTA:

Destaca las precauciones importantes y proporciona instrucciones o explicaciones para la mejor utilización del producto.

### Casos:

- Coloque la mesa de mayo en una posición donde se pueda realizar la observación, funcionamiento y mantenimiento de manera conveniente.
- El presente manual de instrucciones se basa en la configuración de la mesa de mayo IB.
- Conserve este manual a mano para una referencia fácil y oportuna.
- La vida útil de la mesa de mayo es de 10 años\*.

\*Todos los productos de Ideas Biomédicas S.A.S son actualizables y modulares, por lo que si una pieza se daña esta puede ser reemplazada y el producto seguirá funcionando por un mayor periodo de tiempo.

Seguridad

# SÍMBOLOS MESA DE MAYO IB



Capacidad de carga: Sugiere el peso aproximado de 15 kg.



Consulte el manual: Sugiere leer el manual de usuario para uso adecuado de la Mesa de Mayo IB.




Desbloquear/ bloquear llantas: Indica el sentido en el que se debe presionar el freno para bloquear o desbloquear las ruedas.



No apoyarse: Indica no apoyarse sobre la mesa de mayo.

Seguridad

# SÍMBOLOS DE EMBALAJE

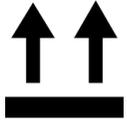

Este lado hacia arriba: Indica la posición correcta del embalaje durante el transporte y el almacenamiento



Sensible a la humedad: Con gotas o sin gotas, si vemos un paraguas éste será para indicar que el embalaje debe mantenerse en un ambiente seco y que el contenido puede dañarse por la humedad.



Muy frágil: Indica que el contenido transportado es frágil y que debe ser manejado con cuidado.



Cuidado en la manipulación: Indica que se debe manejar o manipular con cuidado.



Reciclable: Indica que el material con el que está fabricado el embalaje puede ser reciclado. Aplicable a papel, plástico y vidrio.

## FRAGILE

Descripción General

# PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

- Diseño modular completamente en acero inoxidable, especial para áreas quirúrgicas y trabajo con mesa de cirugía gracias a su sistema de palas, altura variable, bandeja desmontable de 40cm X 26cm, ruedas línea 3 pulgadas grado médico.
- Compacto, versátil, resistente y fácil de transportar ideal en labores de apoyo clínico.

Descripción General

# CARACTERÍSTICAS



Descripción General

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NOMBRE Y CATEGORÍA	
Nombre del producto	Mesa de mayo IB
Marca	Ideas Biomédicas S.A.S
Modelo	No aplica
Palabras claves	Logística hospitalaria, mesa quirúrgica, mesa de cirugía, instrumental quirúrgico
PROPÓSITO DE USO	
Imagen	
Uso clínico	Soporte y preparación de material e instrumental quirúrgico
Nivel permitido de uso	Cirugía, enfermería, anestesia, sala de operaciones
Generalidades	Soporte y preparación de material e instrumental quirúrgico
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Voltaje	No aplica
Potencia	No aplica
Temperatura set	No aplica
Sensor	No aplica

Descripción General

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Control	No aplica
Seguridad	No aplica
Accesorios o consumibles	No aplica
Batería	No aplica
Empaque	Embalaje
Peso	10 kilos aproximadamente
Dimensiones externas	550 profundidad x 830 altura x 350 ancho (mm)
Dimensiones internas	No aplica
Capacidad	15 kilos aproximadamente
Materiales	Acero inoxidable, PLA, ABS
Vida útil	10 años
<b>GARANTÍA Y MANTENIMIENTO</b>	
Garantía	12 meses. Aplica garantía extendida según términos de negociación
Mantenimiento	Anual. Requiere cambio de algunos componentes de desgaste mecánico
<b>SEGURIDAD Y ESTÁNDARES</b>	
Clasificación	No aplica
Certificaciones	No
<b>ESPECIFICACIONES AMBIENTALES</b>	
Condiciones de trabajo	Temperatura ambiente: 0° a 40° C Humedad relativa: ≤ 93%
Condiciones de transporte	La mesa de mayo debe estar protegida de impactos y vibración violenta.
Condiciones de almacenamiento	La mesa de mayo debe estar embalada y almacenada en un cuarto libre de agentes corrosivos y humedad excesiva

\*La altura puede variar dependiendo de la configuración.

Instalación

# DESEMBALAJE E INSPECCIÓN

Retirar cuidadosamente el empaque y verificar cada uno de los elementos. En caso de daños, comuníquese de inmediato con Ideas Biomédicas S.A.S o con su distribuidor.

- Verificar que todos los elementos suministrados coinciden con la factura.

**ADVERTENCIA:** Antes de usar, verifique la mesa de mayo, para garantizar su funcionamiento normal y seguro. Cuando elimine el material de embalaje cumpla con las leyes y disposiciones locales y con las normas de eliminación de residuos del hospital. Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

- Verificar que no haya daños.

**ADVERTENCIA:** Si necesita devolver el producto a Ideas Biomédicas S.A.S, comuníquese con el departamento de servicio post-venta de nuestra compañía o con el distribuidor. Deberá suministrar el número de serie del producto, que puede encontrar en la placa de identificación ubicada en la parte lateral inferior izquierda. Si el número es ilegible, la devolución le será denegada. Además, una breve descripción del motivo de devolución para determinar si la devolución es aplicable.



Instalación

# USO INICIAL

- Desbloquear sistema de frenado.
- Colocar las manos sobre la manija, ubicarse de manera paralela a la mesa.

**PRECAUCIÓN:** Garantice la seguridad del usuario y evite el desarrollo de patologías asociadas a posturas incorrectas.

- Extender el pie de preferencia.
- Empujar suavemente la mesa.
- Colocar las manos sobre la manija, ubicarse de manera paralela a la Mesa de Mayo IB con una distancia de 20 cm aprox.

**PRECAUCIÓN:** Use la mesa con cuidado para evitar daños causados por caídas, golpes, oscilación violenta u otras fuerzas mecánicas externas.

- Extender el pie contrario de acuerdo con la zancada de cada usuario.
- Al tener la Mesa de Mayo IB en la ubicación final, active el sistema de frenado.

**PRECAUCIÓN:** Evite daños en el atril y garantice la seguridad del usuario.

Limpieza y Mantenimiento

# PLAN DE MANTENIMIENTO

Las actividades de mantenimiento deben ser realizadas por personal autorizado por Ideas Biomédicas S.A.S, en el plazo descrito para cada componente. Antes de realizar pruebas o mantenimiento el atril debe estar limpio y desinfectado.

ELEMENTO DE PRUEBA Y/O MANTENIMIENTO	FRECUENCIA
Bandeja acero inoxidable	Anual o cuando sea necesario
Ruedas	Anual o cuando sea necesario
Pala Inoxidable Satinada	Anual o cuando sea necesario
Tubo inoxidable	Anual o cuando sea necesario
Base horizontal	Anual o cuando sea necesario
Perilla plástica PLA 6 puntas M6	Anual o cuando sea necesario
Tubo inoxidable soporte bandeja	Anual o cuando sea necesario
Tornillería	Anual o cuando sea necesario

Limpieza y Mantenimiento

# PROTOCOLO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Fecha:	Responsable:
Área:	Serial:

ACTIVIDAD	APRUEBA	DESAPRUEBA
Realizar inspección física de la mesa de mayo para determinar las condiciones en las que se encuentra		
Verificar estado bandeja acero inoxidable		
Verificar estado ruedas		
Verificar estado pala Inoxidable Satinada		
Verificar estado tubo inoxidable		
Verificar estado base horizontal		
Verificar estado tubo inoxidable soporte bandeja		
Realizar limpieza general		
Realizar ajuste o cambio de partes		
Lubricación de partes		

Observaciones:

Limpieza y Mantenimiento

# PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Todos los aceros inoxidables contienen el cromo suficiente para darles sus características de inoxidables. Muchas aleaciones inoxidables contienen además níquel para reforzar aún más su resistencia a la corrosión. Estas aleaciones son añadidas al acero en estado de fusión para hacerlo "inoxidable en toda su masa". Por este motivo, los aceros inoxidables no necesitan ser ni cubiertos, ni pintados, ni de ningún otro tratamiento superficial para mejorar su resistencia a la corrosión.

El acero ordinario, cuando queda expuesto a los elementos, se oxida y se forma óxido de hierro en su superficie. Si no se combate, la oxidación sigue adelante hasta que el acero esté completamente corroído.

También los aceros inoxidables se oxidan, pero en vez de óxido común, lo que se forma en la superficie es una tenue película de óxido de cromo muy densa que constituye una coraza contra los ataques de la corrosión. Si se elimina esta película de óxido de cromo que recubre los aceros inoxidables, se vuelve a formar inmediatamente al combinarse el cromo con el oxígeno de la atmósfera ambiente.

Cuando las secciones inoxidables entran en servicio deberán estar limpias de escamas de óxido, de aceite, de pequeñas partículas metálicas procedentes de las herramientas, troqueles e hileras, así como de todo material extraño. La corrosión por contacto puede iniciarse al cabo de mucho tiempo de estar la pieza en servicio si los métodos de limpieza empleados no son meticulosos. Óxido y suciedad en los conductos de vapor, herramientas impregnadas con acero al carbono, e inclusive aparatos de transporte sucios, pueden acarrear sustancias creadoras de corrosión por contacto hasta los recipientes de acero inoxidable durante un período de limpieza. Unas superficies limpias y lisas, así como la ausencia de arañazos y grietas reduce el riesgo de que se produzca corrosión por contacto.

Ideas Biomédicas S.A.S sugiere productos de limpieza como SURFALKAN o SEPTALKAN para proteger a largo plazo el material del mobiliario.

Limpieza y Mantenimiento

# Septalkan® | Instrucciones de Uso



1.

Asegúrese que la zona a limpiar y desinfectar se encuentre libre de sobre acumulación de polvo o materia orgánica.



2.

Aplique **Septalkan Spray** sobre un paño de microfibra o Wypall.



3.

Distribuya uniformemente en la zona que desea limpiar y desinfectar, respetando la técnica de limpieza y deje secar.



4.

No enjuague ni retire el producto. La zona estará libre de microorganismos patógenos (bacterias, virus, hongos y esporas).



5.

Distribuya uniformemente en la zona que desea limpiar y desinfectar, respetando la técnica de limpieza y deje secar.

Limpieza y Mantenimiento

# Surfalkan® | Instrucciones de Uso



- 1.** Asegúrese que la superficie a limpiar y desinfectar se encuentre libre de sobreacumulación de polvo o materia orgánica.



- 2.** Aplique el producto directamente sobre toda la zona que desea limpiar y desinfectar.



- 3.** Distribuya uniformemente con un paño no tejido respetando la técnica de limpieza y deje secar.



- 4.** Deje actuar el producto sobre la superficie donde fue aplicado. Tiempo de contacto total de 5 minutos.



- 5.** No enjuague ni retire el producto. La superficie quedará libre de microorganismos patógenos.

Disposición Final

# FICHA AMBIENTAL



Ideas Biomédicas S.A.S informa con la presente que, en general, la disposición final del mobiliario es decisión del respectivo cliente.

Sin embargo, cabe anotar que todos los componentes estructurales son 100% reciclables.

Ahora, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) un residuo o desecho electrónico es todo dispositivo alimentado por la energía eléctrica cuya vida útil haya culminado. Por lo tanto, los componentes electrónicos internos presentes en el equipo (switches, fusibles, portafusibles, controlador MaxThermo, piloto de alarma y toma), necesitan de una vía de disposición diferente a la de los estructurales. Una medida importante puede ser contactar con una empresa de reciclaje y/o tratamiento de este tipo de desechos.

Todas las líneas de mobiliario promueven la economía circular permitiendo la reducción de costos asociados a nuevas compras, protegiendo el medio ambiente e impulsando el consumo sostenible.

Disposición Final

# FICHA AMBIENTAL

ELEMENTO	RECICLABLE
Bandeja acero inoxidable	Si
Ruedas	Si
Pala Inoxidable Satinada	Si
Tubo inoxidable	Si
Base horizontal	Si
Perilla plástica PLA 6 puntas M6	Si
Tubo inoxidable soporte bandeja	Si
Tornillería	Si

Garantía

# TÉRMINOS Y CONDICIONES

Garantía:

- Para mobiliario: Garantía de doce (12) meses por defectos de fabricación.
- Para los accesorios: Garantía de tres (3) meses, a menos que el producto tenga una garantía diferente y sea pactada por escrito. Los consumibles entregados con no tienen garantía.

Tiempo de respuesta de la garantía:

- Una vez Ideas Biomédicas S.A.S confirma recepción del equipo, este será revisado y se verificará que su uso haya sido adecuado.
- El tiempo para tramitar y dar respuesta a las garantías es de 5 días hábiles, a partir de que Ideas Biomédicas S.A.S firma la recepción del equipo.

Costos de garantía:

- Si en la revisión del equipo se identifica que efectivamente es una garantía, no hay costos adicionales en el momento de reponer el equipo por uno nuevo.
- Si en la revisión del equipo se identifica que NO es una garantía y el cliente decide hacer la reparación con Ideas Biomédicas S.A.S, NO hay costos adicionales por revisión de garantía.
- Si en la revisión de equipo, se identifica que NO es garantía y el cliente decide NO realizar la reparación con Ideas Biomédicas S.A.S, el cliente deberá asumir un cobro por concepto de la revisión del equipo, el cual se indicará en el momento en que se le notifique al cliente la NO garantía, debido a que este valor varía de acuerdo con el equipo médico.
- Cuando el departamento de servicio técnico defina que NO es una garantía, se notificará al cliente por correo electrónico y se enviará el costo de la reparación, si después de 5 días hábiles de haber notificado el costo de la reparación, el cliente no da una respuesta ni reclama el equipo en las instalaciones de Ideas Biomédicas S.A.S, de acuerdo al artículo 18 de la ley 1480 de 2011 de la República de Colombia, pasado un mes de la fecha prevista para la reclamación del equipo o a la fecha en que el cliente debe aceptar o rechazar expresamente la reparación, Ideas Biomédicas S.A.S notificará al cliente por correo certificado para que lo retire dentro de los dos meses siguientes a la remisión de la comunicación. Si el cliente no lo retira se entenderá por ley que abandona el bien e Ideas Biomédicas S.A.S deberá disponer del mismo conforme con la reglamentación que expida el gobierno nacional.

Garantía

# TÉRMINOS Y CONDICIONES

- De acuerdo con esto, posterior a los dos meses siguientes de notificar por escrito cliente sobre el retiro del equipo de las instalaciones de Ideas Biomédicas S.A.S, el cliente “deberá asumir los costos asociados al abandono del bien tales como costos de almacenamiento, bodegaje y mantenimiento” costos que serán indicados al cliente en el momento de enviar la cotización de la reparación del equipo, este costo varía dependiendo del equipo.

No hay garantía cuando las fallas son causadas por mal uso del mobiliario médico, de los equipos o por redes eléctricas inadecuadas. En todo caso la garantía que aplica se especifica en la factura y será correspondiente a las características que permita cada producto.

Exoneración de responsabilidad de la garantía:

- El uso indebido del bien por parte del consumidor, la no atención de las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicadas en el manual del producto y en la garantía.
- Si se cambia una o varias piezas o partes del bien, éstas tendrán garantía propia.

Por avería del transportador:

- En el caso que los productos sean averiados por causa de la transportadora, el cliente deberá dejar evidencia en la guía y en la orden de entrega de Ideas Biomédicas S.A.S y debe informar a la transportadora sobre esta inconformidad en el momento de recibo de la mercancía. En este caso, el cliente tendrá máximo tres (3) días calendario a partir de la fecha de recepción y debe presentar pruebas físicas (fotos).

Devolución:

- Si necesita devolver el producto a Ideas Biomédicas S.A.S, comuníquese con el departamento de servicio postventa. Deberá suministrar el número de serie del producto, que puede encontrar en la placa de identificación de este. Si el número es ilegible, la devolución le será denegada. Además, deberá presentar la fecha de producción y una breve descripción del motivo de devolución para evaluar la pertinencia de la situación.

Contacto

# DIRECTORIO IDEAS BIOMÉDICAS

ÁREA	CORREO
Calidad	<a href="mailto:calidad@ideasbiomedicas.com">calidad@ideasbiomedicas.com</a>
Información	<a href="mailto:info@ideasbiomedicas.com">info@ideasbiomedicas.com</a>
Servicio post-venta	<a href="mailto:soporte@ideasbiomedicas.com">soporte@ideasbiomedicas.com</a>

